


Cuscino di elevazione Troop Elevation Pillow / Istruzioni d'uso




*Studiato per essere utilizzato con un posizionatore standard da intubazione
Collocare un lenzuolo trasversalmente al di sotto del Troop Elevation Pillow; ciò faciliterà lo spostamento del paziente insieme al cuscino di elevazione, qualora ciò si renda necessario*

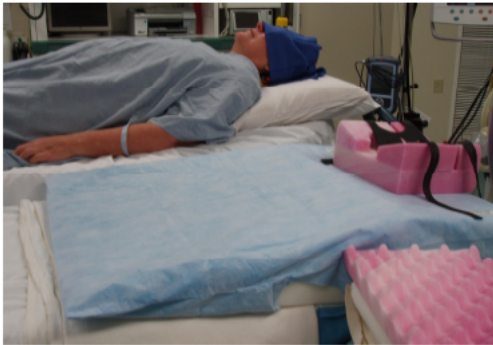

*Inclinare leggermente il tavolo operatorio verso il basso per facilitare il trasferimento del paziente; effettuato il trasferimento, sistemare il tavolo operatorio in posizione H.E.L.P. (Head Elevated Laryngoscopy Position)
Collocare un normale cuscino sotto le ginocchia del paziente*

Utilizzare la protezione impermeabile con il Troop Elevation Pillow

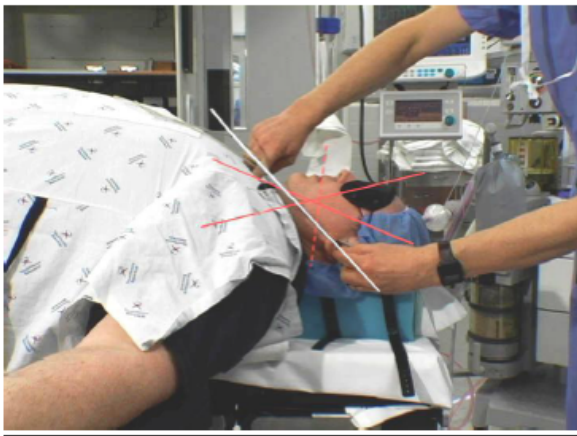

Pazienti Obesi: da posizione completamente supina a posizione H.E.L.P.

Consigli per l'utilizzo del cuscino di elevazione Troop Elevation Pillow

- 1) Posizionare il cuscino di elevazione Troop Elevation Pillow alla testa del tavolo operatorio ricoprendolo con la protezione impermeabile (la copertura di protezione fornisce al paziente ulteriore comfort e permette di mantenere il cuscino pulito – la copertura viene venduta separatamente). **Collocare un posizionatore standard da intubazione o a ciambella sul plateau/parte piatta del cuscino di elevazione.** Collocare trasversalmente un lenzuolo *al di sotto* del cuscino di elevazione. Nel caso in cui dopo l'intubazione il paziente debba essere spostato verso il basso lungo il tavolo operatorio (per esempio nella posizione di litotomia), sollevandolo con il lenzuolo sia il paziente che il cuscino di elevazione possono essere spostati simultaneamente mantenendo la testa del paziente sempre in posizione elevata (posizione H.E.L.P. : **Head Elevated Laryngoscopy Position**)
- 2) Inclinare il tavolo operatorio di ~5-10 gradi verso il basso (affinché il paziente possa essere trasferito dalla barella al tavolo operatorio a “pari livello”).
- 3) Le spalle del paziente dovrebbero adattarsi sulla curva superiore del **Troop Elevation Pillow**. La testa del paziente dovrebbe riposare sul posizionatore standard da intubazione al margine superiore del Troop Elevation Pillow.
- 4) Una volta che il paziente è sul tavolo operatorio, adagiato sull' **Elevation Pillow e sul posizionatore standard da intubazione**, aggiustare il tavolo di ~5-10 gradi verso l'alto, in base alla necessità.
- 5) Creare un appoggio per le braccia con la gomma piuma e/o arrotolando una coperta o utilizzando il **Supporto di Elevazione per Braccia (venduto separatamente)...articolo # 10-910-07**
- 6) Posizionare un normale cuscino sotto le ginocchia del paziente.

ATTENZIONE: DURANTE L'OPERAZIONE, CONTROLLARE ATTENTAMENTE CHE IL TROOP ELEVATION PILLOW E IL PAZIENTE NON 'SCIVOLINO' SE IL TAVOLO OPERATORIO È IN POSIZIONE TRENDELENBERG

Nota: usare per ogni paziente una nuova protezione, che può essere acquistata separatamente (30pz per scatola) - articolo # 10-910-03

'Teaching web site'...www.troopelevationpillow.com



(Leggere le istruzioni d'uso)



(Produttore)

CR Enterprises, LLC (Manufactured for Mercury Medical)
4701 Augusta Drive (1-800-237-6418) (www.mercurymed.com)
Frisco, Texas 75034
rtroop@tx.rr.com 972-679-9250



CE EU rep

Martin Staiger, Staiger + Vogel
Boblinger strasse 29b, 70178 Stuttgart
Stuttgart, Germany (0049 711 664 52 62)